


# INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

LÍNEA ANTIESCARAS VISCOELÁSTICA Y GOMA ESPUMA ORTOTEX MEDICAL

**VISCOELÁSTICO  
ECONÓMICO REF. QV15726**  
PMU: 80kg




**VISCOELÁSTICO A MEDIDA  
REF. 22022 PMU: 80kg**

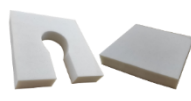

**CUÑA COXIS REF. 11770**  
PMU: 90kg



**GOMA-ESPUMA REF.  
GE15726 PMU: 90kg**

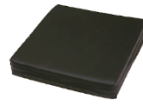

ORTOTEX MEDICAL S.L.  
CALLE CEFERINO AMADOR S/N  
30195 Archivel (Murcia) ESPAÑA  
Teléfono: +34 968726465  
[www.ortotexmedical.com](http://www.ortotexmedical.com)

Estimado cliente,

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros, en Ortotex Medical estamos a su disposición para ayudar a que mejore de la forma más rápida posible. Lea estas instrucciones de uso atentamente y guárdelas junto con su envase para cualquier necesidad en un futuro. En caso de duda consulte con su médico, ortopedia o contacte con nosotros vía mail o por teléfono.

ORTOTEX MEDICAL S.L. Da garantía para todos los productos que fabrica, si los mismos no han sido manipulados ni alterados en su configuración original, excluyendo de este precepto el uso prescrito en las presentes instrucciones. Tampoco están garantizados los que, debido a un mal uso, se produzca cualquier tipo de rotura. Si tiene que hacer uso de la garantía, comuníquese con el centro donde lo adquirió, ellos lo gestionarán para solucionarlo de la forma más rápida y satisfactoria para todas las partes.

Los **cojines antiescaras** de ORTOTEX MEDICAL, S.L. tienen una vida útil aproximada de 6 meses a un año con un uso diario e intensivo. En caso de que el uso sea esporádico, puede prolongarse hasta los dos años o por encima de esta duración. La vida útil está en función de la correcta utilización y mantenimiento del producto según las especificaciones descritas en el manual del usuario.

Si se produce un incidente grave provocado o relacionado con el producto, por favor, comuníquelo a la autoridad competente en su Estado y a ORTOTEX MEDICAL S.L.

## NORMATIVA APLICABLE

Toda esta línea de artículos son productos sanitarios de Clase I. Análisis y ensayos realizados: Para minimizar los riesgos que pudiesen existir según UNE EN ISO 14971:2022 y ensayos clínicos según normas UNE EN ISO 16840-2 ("Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios") y 12182 ("Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo").

## INDICACIONES

	Propiedades viscoelástica	Indicaciones Comunes Cojines
<b>Viscoelástico económico Ref. QV15726</b>	Espuma viscoelástica con una gran capacidad de envolvimiento de la superficie corporal, lo que aumenta el área de contacto entre el cojín y el cuerpo y absorbe el impacto de las cargas. Prevención y descarga de puntos de presión corporal por movilidad reducida y sedestación prolongada, alivio de presiones corporales que ayudan a evitar contracturas, molestias y dolor (lumbalgia, coccigodinia, escaras, úlceras, etc).	Prevención de la aparición de úlceras por presión debidas a la restricción del flujo de sangre como consecuencia de la compresión puntual de las redes arteriales de los tejidos blandos cuando se encuentran entre dos planos duros: la superficie ósea y el plano de apoyo (cama o silla).
<b>Viscoelástico a medida Ref. 22022</b>		Proporcionar un apoyo eficaz desde el que el usuario pueda realizar sin dificultad una amplia variedad de tareas.
		<b>Indicaciones particulares cuña coxis</b>
<b>Cojín Gomaespuma Ref. GE15726</b>	Prevención de la aparición de úlceras por presión debidas a la restricción del flujo de sangre como consecuencia de la compresión puntual de las redes arteriales de los tejidos blandos cuando se encuentran entre dos planos duros: la superficie ósea y el plano de apoyo (cama o silla).	
<b>Cojín cuña coxis Ref. 22022</b>	Proporcionar un apoyo eficaz desde el que el usuario pueda realizar sin dificultad una amplia variedad de tareas.  Generar confort, ayudar a mantener la postura, absorber los impactos que se producen al desplazar la silla de ruedas, al realizar trabajos o durante las transferencias.	Hemorroides. Fistulas y fisuras en el ano. Fistulas y otros procesos algicos post-parto. Recuperación post-operatoria en enfermedades de la próstata o suelo pélvico. Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, isquiática, glútea, perineal (anal y/o urogenital).

## INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta del modelo más adecuado a cada paciente o usuario.

Ante cualquier duda sobre la correcta utilización y funcionamiento del producto, confíe en su técnico ortoprotésico y/o en personal sanitario capacitado para ello.

### Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

- 1- Se puede utilizar en silla de ruedas o en cualquier tipo de asiento (silla, sillón, ...).
- 2- Coloque el cojín sobre la superficie del asiento y, por medio de las cintas (en los modelos que dispongan de ellas), átelo a su estructura rígida.

## PRECAUCIONES

Antes de cada uso compruebe que el producto está en perfectas condiciones. Si observa alguna deficiencia póngalo en conocimiento del establecimiento donde lo adquirió lo antes posible.


El material que compone el producto es inflamable. No lo exponga a situaciones que puedan conllevar su ignición. En caso de que se produzca, quíteselo o aléjese y sofóque el fuego con los medios adecuados para hacerlo.

Si detecta cualquier deterioro en la piel con motivo del uso del producto, retírelo y consulte con su médico o técnico ortoprotésico. Uso recomendado del producto para pieles intactas sin heridas o cicatrices.

## RECOMENDACIONES – ADVERTENCIAS

Use los productos según sus indicaciones. Se recomienda su uso por un único usuario y sólo para los fines indicados en las instrucciones o recomendado por su médico. Tras el uso por el usuario al que va destinado, se recomienda proceder a su desecho. Para desechar el envase y producto, cumpla la normativa legal de su comunidad.

## CONSERVACIÓN Y LAVADO

Lavado funda exterior:  Lavado max. 90°. No usar lejía ni derivados. Planchado a temperatura media. Se puede usar percloroetileno. No se recomienda lavado en seco. Se puede limpiar con un paño o esponja húmeda.

## NO LAVAR LA ESPUMA VISCOELÁSTICA NI LA GOMA-ESPUMA

Durante su uso o en su limpieza: no utilice lejías, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN:** Manipule el producto según aparece en estas instrucciones. Almacenamiento: Para evitar su deformación se recomienda colocarlo en posición horizontal y sin apilar nada encima. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.

Fecha de creación: 07/2022

Fecha de revisión: 07/2022 | Rev. 1.0