


INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

LÍNEA ANTIESCARAS VISCO GEL INTELIGENTE ORTOTEX MEDICAL

ANATÓMICO Ref. 23758
PMU: 130kg

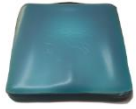

COXIS Ref. 23759
PMU: 110kg



3D Ref. 23760
PMU: 130kg



HERRADURA Ref. 23761
PMU: 110kg



Estimado cliente,

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros, en Ortotex Medical estamos a su disposición para ayudar a que mejore de la forma más rápida posible. Lea estas instrucciones de uso atentamente y guárdelas junto con su envase para cualquier necesidad en un futuro. En caso de duda consulte con su médico, ortopedia o contacte con nosotros vía mail o por teléfono.

ORTOTEX MEDICAL S.L. Da garantía para todos los productos que fabrica, si los mismos no han sido manipulados ni alterados en su configuración original, excluyendo de este precepto el uso prescrito en las presentes instrucciones. Tampoco están garantizados los que, debido a un mal uso, se produzca cualquier tipo de rotura. Si tiene que hacer uso de la garantía, comuníquese con el centro donde lo adquirió, ellos lo gestionarán para solucionarlo de la forma más rápida y satisfactoria para todas las partes.

Los **cojines antiescaras** de ORTOTEX MEDICAL, S.L. tienen una vida útil aproximada de 6 meses a un año con un uso diario e intensivo. En caso de que el uso sea esporádico, puede prolongarse hasta los dos años o por encima de esta duración. La vida útil está en función de la correcta utilización y mantenimiento del producto según las especificaciones descritas en el manual del usuario.

Si se produce un incidente grave provocado o relacionado con el producto, por favor, comuníquelo a la autoridad competente en su Estado y a ORTOTEX MEDICAL S.L.

NORMATIVA APLICABLE

Toda esta línea de artículos son productos sanitarios de Clase I. Análisis y ensayos realizados: Para minimizar los riesgos que pudiesen existir según UNE EN ISO 14971:2022 y ensayos clínicos según normas UNE EN ISO 16840-2 ("Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios") y 12182 ("Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo").

INDICACIONES

	Propiedades visco gel inteligente	Indicaciones Comunes para todos los cojines	Indicaciones particulares.
Anatómico 85 kg/m² Ref. 23758	El diseño de patrón punteado brinda una suave sensación de masaje en la zona trasera y las piernas, así como promueve la circulación de aire en la zona isquiática. Esta sensación se realiza con la funda de poliuretano bielástico transpirable.	Prevención de la aparición de úlceras por presión debidas a la restricción del flujo de sangre como consecuencia de la compresión puntual de las redes arteriales de los tejidos blandos cuando se encuentran entre dos planos duros: la superficie ósea y el plano de apoyo (cama o silla).	Prevención de escaras en personas con alto riesgo y como método auxiliar en su tratamiento.
Coxis 85 kg/m² Ref. 23759	Lo que hace que sea así es el gel hipoalérgico incorporado, suave al tacto, confortable, sólido y líquido al mismo tiempo, y la espuma viscoelástica no tóxica, que proporciona una forma ergonómica y un apoyo correcto para su espalda.	Proporcionar un apoyo eficaz desde el que el usuario pueda realizar sin dificultad una amplia variedad de tareas.	<ul style="list-style-type: none"> Fracturas y otros procesos álgicos de la región sacrococcigea. Dolor anal crónico idiopático (DACI). Bursitis de cadera. Ayuda para cambios de postura. Ligeras asimetrías posturales.
3D coxis 85 kg/m² Ref. 23760	El gel puede modificar su forma en tres dimensiones gracias a sus características viscoelásticas y su densidad, ofreciendo la resistencia correcta y proporcionando el apoyo más conveniente cuando permanece sentado.	Generar confort, ayudar a mantener la postura, absorber los impactos que se producen al desplazar la silla de ruedas, al realizar trabajos o durante las transferencias.	<ul style="list-style-type: none"> Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo prolongados en sedestación. Condiciones que necesiten control y estabilidad postural desde la zona pélvica. Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en general. Estabilidad pélvica y soporte postural ML y AP moderados.
Herradura 85 kg/m² Ref. 23761	Gracias a su alto peso específico, casi como el del agua, el gel distribuye la presión corporal de la manera más uniforme posible y ayuda a la circulación de la sangre. La conductividad térmica del gel favorece la dispersión de calor ayudando a percibir una agradable sensación de frescor durante su uso.		



ORTOTEX MEDICAL S.L.
CALLE CEFERINO AMADOR S/N
30195 Archivel (Murcia) ESPAÑA
Teléfono: +34 968726465
www.ortotexmedical.com

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta del modelo más adecuado a cada paciente o usuario.

Ante cualquier duda sobre la correcta utilización y funcionamiento del producto, confíe en su técnico ortoprotésico y/o en personal sanitario capacitado para ello.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

- Se puede utilizar en silla de ruedas o en cualquier tipo de asiento (silla, sillón, ...).
- Coloque el cojín sobre la superficie del asiento y, por medio de las cintas (en los modelos que dispongan de ellas), átelo a su estructura rígida.

PRECAUCIONES

Antes de cada uso compruebe que el producto está en perfectas condiciones. Si observa alguna deficiencia póngalo en conocimiento del establecimiento donde lo adquirió o antes posible.


El material que compone el producto es inflamable. No lo exponga a situaciones que puedan conllevar su ignición. En caso de que se produzca, quíteselo o aléjese y sofoque el fuego con los medios adecuados para hacerlo.

Si detecta cualquier deterioro en la piel con motivo del uso del producto, retírelo y consulte con su médico o técnico ortoprotésico. Uso recomendado del producto para pieles intactas sin heridas o cicatrices.

RECOMENDACIONES – ADVERTENCIAS

Use los productos según sus indicaciones. Se recomienda su uso por un único usuario y sólo para los fines indicados en las instrucciones o recomendado por su médico. Tras el uso por el usuario al que va destinado, se recomienda proceder a su desecho. Para desechar el envase y producto, cumpla la normativa legal de su comunidad.

CONSERVACIÓN Y LAVADO

Lavado funda exterior:  Lavado max. 90°. No usar lejía ni derivados. Planchado a temperatura media. Se puede usar percloroetileno. No se recomienda lavado en seco. Se puede limpiar con un paño o esponja húmeda.

NO LAVAR LA ESPUMA VISCOELÁSTICA

Durante su uso o en su limpieza: no utilice lejías, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN: Manipule el producto según aparece en estas instrucciones. Almacenamiento: Para evitar su deformación se recomienda colocarlo en posición horizontal y sin apilar nada encima. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.