

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

LÍNEA ANALÉRGICA ORTOTEX MEDICAL

Medidas ancho según Ref:

REFERENCIA	821	811	812	813	814	815	820
MEDIDA (cm)	70	80	90	105	120	135	150

Medidas largo colchón:

180 – 190 – 200 cm

Medidas ancho según Ref:

REFERENCIA	806	807	808	809	810	819	818 (cuna)
MEDIDA (cm)	80	90	105	120	135	150	60x120

FUNDA ALMOHADA ANTIÁCAROS



FUNDA COLCHÓN ANTIÁCAROS



ORTOTEX MEDICAL S.L.
CALLE CEFERINO AMADOR S/N
30195 Archivel (Murcia) ESPAÑA
Teléfono: +34 968726465
www.ortotexmedical.com

Estimado cliente,

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros, en Ortotex Medical estamos a su disposición para ayudar a que mejore de la forma más rápida posible. Lea estas instrucciones de uso atentamente y guárdelas junto con su envase para cualquier necesidad en un futuro. En caso de duda consulte con su médico, ortopedia o contacte con nosotros vía mail o por teléfono.

ORTOTEX MEDICAL S.L. Da garantía para todos los productos que fabrica, si los mismos no han sido manipulados ni alterados en su configuración original, excluyendo de este precepto el uso prescrito en las presentes instrucciones. Tampoco están garantizados los que, debido a un mal uso, se produzca cualquier tipo de rotura. Si tiene que hacer uso de la garantía, comuníquese con el centro donde lo adquirió, ellos lo gestionarán para solucionarlo de la forma más rápida y satisfactoria para todas las partes.

Los tejidos analérgicos de ORTOTEX MEDICAL, S.L. tienen una vida útil aproximada de 6 meses a un año con un uso diario e intensivo. En caso de que el uso sea esporádico, puede prolongarse hasta los dos años o por encima de esta duración. La vida útil está en función de la correcta utilización y mantenimiento del producto según las especificaciones descritas en el manual del usuario.

Si se produce un incidente grave provocado o relacionado con el producto, por favor, comuníquelo a la autoridad competente en su Estado y a ORTOTEX MEDICAL S.L.

NORMATIVA APLICABLE

Toda esta línea de artículos son productos sanitarios de Clase I. Análisis y ensayos realizados: Para minimizar los riesgos que pudiesen existir según UNE EN ISO 14971:2022 y ensayos clínicos según normas UNE EN ISO 16840-2 ("Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios") y 12182 ("Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo").

INDICACIONES

Los Artículos Analérgicos Ortotex, están fabricados con tejidos transpirables que dejan pasar el vapor de agua (Cara A) siendo al mismo tiempo una barrera infranqueable para Ácaros y demás componentes alergénicos del polvo doméstico (Cara B). Esto permite una doble acción sobre los Ácaros, aislarlos eficientemente e impedir el depósito de células escamosas sobre el Colchón la Almohada, ya que estas contribuyen la base de la alimentación.

Los Tejidos Analérgicos Ortotex están recubiertos por las últimas generaciones de Poliuretano Transpirable que han sido fabricados con fórmulas especiales para responder ante todo a las necesidades Anti-Alérgicas, presentando además ventajas ecológicas al no contener PVC en su composición.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta de la talla más adecuada a cada paciente o usuario. Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

Ante cualquier duda sobre la correcta utilización y funcionamiento del producto, confíe en su técnico ortoprotésico y/o en personal sanitario capacitado para ello.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

- Coloque la funda en la almohada o bien en el colchón y cierre la cremallera.

PRECAUCIONES

Antes de cada uso compruebe que el producto está en perfectas condiciones. Si observa alguna deficiencia póngalo en conocimiento del establecimiento donde lo adquirió lo antes posible.

El material que compone el producto es inflamable. No lo exponga a situaciones que puedan conllevar su ignición. En caso de que se produzca, quíteselo o aléjese y sofoque el fuego con los medios adecuados para hacerlo.


Si detecta cualquier deterioro en la piel con motivo del uso del producto, retírelo y consulte con su médico o técnico ortoprotésico. Uso recomendado del producto para pieles intactas sin heridas o cicatrices.

RECOMENDACIONES – ADVERTENCIAS

Use los productos según sus indicaciones. Se recomienda su uso por un único usuario y sólo para los fines indicados en las instrucciones o recomendado por su médico. Tras el uso por el usuario al que va destinado, se recomienda proceder a su desecho. Para desechar el envase y producto, cumpla la normativa legal de su comunidad.

CONSERVACIÓN Y LAVADO

- Lavado convencional hasta 90°C.
- Esterilizable en autoclave hasta 120°C.
- Puede limpiarse con un paño o esponja húmeda.

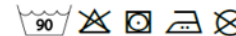

Durante su uso o en su limpieza: no utilice lejías, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN: Manipule el producto según aparece en estas instrucciones. Almacenamiento: Para evitar su deformación se recomienda colocarlo en posición horizontal y sin apilar nada encima. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.