

# INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

## LÍNEA ALMOHADAS ESPECÍFICAS ORTOTEX MEDICAL



Estimado cliente,

Le agradecemos la confianza depositada en nosotros, en Ortotex Medical estamos a su disposición para ayudar a que mejore de la forma más rápida posible. Lea estas instrucciones de uso atentamente y guárdelas junto con su envase para cualquier necesidad en un futuro. En caso de duda consulte con su médico, ortopedia o contacte con nosotros vía mail o por teléfono.

ORTOTEX MEDICAL S.L. Da garantía para todos los productos que fabrica, si los mismos no han sido manipulados ni alterados en su configuración original, excluyendo de este precepto el uso prescrito en las presentes instrucciones. Tampoco están garantizados los que, debido a un mal uso, se produzca cualquier tipo de rotura. Si tiene que hacer uso de la garantía, comuníquese con el centro donde lo adquirió, ellos lo gestionarán para solucionarlo de la forma más rápida y satisfactoria para todas las partes.

Las almohadas de ORTOTEX MEDICAL, S.L. tienen una vida útil aproximada de 6 meses a un año con un uso diario e intensivo. En caso de que el uso sea esporádico, puede prolongarse hasta los dos años o por encima de esta duración. La vida útil está en función de la correcta utilización y mantenimiento del producto según las especificaciones descritas en el manual del usuario.

Si se produce un incidente grave provocado o relacionado con el producto, por favor, comuníquelo a la autoridad competente en su Estado y a ORTOTEX MEDICAL S.L.

### NORMATIVA APLICABLE

Toda esta línea de artículos son productos sanitarios de Clase I. Análisis y ensayos realizados: Para minimizar los riesgos que pudiesen existir según UNE EN ISO 14971:2022 y ensayos clínicos según normas UNE EN ISO 16840-2 ("Productos sanitarios. Aplicación de la gestión de riesgos a los productos sanitarios") y 12182 ("Productos de apoyo para personas con discapacidad. Requisitos generales y métodos de ensayo").

### INDICACIONES

- Condromatititis nodular del hélix. (Almohada de oreja y protector oreja)
- Lesiones en el pabellón auricular o cuando estas zonas están sometidas a presión prolongada. (Almohada de oreja).
- Post-operatorios oculares. (Almohada ocular).
- Pacientes con problemas respiratorios y mascarilla CPAP (almohada nasal).
- Descanso durante el embarazo (Almohada embarazo)

### INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

Para obtener el mayor grado de eficacia terapéutica en las diferentes patologías y prolongar la vida útil del producto, es fundamental la elección correcta del modelo más adecuado a cada paciente o usuario.

Ante cualquier duda sobre la correcta utilización y funcionamiento del producto, confíe en su técnico ortoprotésico y/o en personal sanitario capacitado para ello.

Para su colocación deben observarse los siguientes aspectos:

ALMOHADAS ESPECÍFICAS (OCULAR, DE OREJA Y NASAL):

- 1- Coloque la almohada bajo el respectivo segmento corporal.

ALMOHADADA PARA EMBARAZADA:

- 1- Acomode la almohada al cuerpo para aumentar la comodidad durante el descanso.

PROTECTOR OREJA:

- 1- Coloque la almohada en la oreja, ajuste la cinta elástica fijando un velcro a un extremo de la almohada y pasándola alrededor de la cabeza hasta fijar el segundo velcro.



ORTOTEX MEDICAL S.L.  
CALLE CEFERINO AMADOR S/N  
30195 Archivel (Murcia) ESPAÑA  
Teléfono: +34 968725465  
[www.ortotexmedical.com](http://www.ortotexmedical.com)

### PRECAUCIONES

Antes de cada uso compruebe que el producto está en perfectas condiciones. Si observa alguna deficiencia póngalo en conocimiento del establecimiento donde lo adquirió lo antes posible.

El material que compone el producto es inflamable. No lo exponga a situaciones que puedan conllevar su ignición. En caso de que se produzca, quíteselo o aléjese y sofóque el fuego con los medios adecuados para hacerlo.

Si detecta cualquier deterioro en la piel con motivo del uso del producto, retírelo y consulte con su médico o técnico ortoprotésico. Uso recomendado del producto para pieles intactas sin heridas o cicatrices.


### RECOMENDACIONES – ADVERTENCIAS

Use los productos según sus indicaciones. Se recomienda su uso por un único usuario y sólo para los fines indicados en las instrucciones o recomendado por su médico. Tras el uso por el usuario al que va destinado, se recomienda proceder a su desecho. Para desechar el envase y producto, cumpla la normativa legal de su comunidad.

### CONSERVACIÓN Y LAVADO

Almohada para oreja, almohada ocular, interior almohada embarazo, interior almohada nasal.

Lavado a máquina: lave a máquina con jabón neutro, agua fría y sin centrifugar. Dejar secar a temperatura ambiente y sobre una superficie plana. No use lejía. No tienda ni planche y no exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol, etc. No limpie en seco.

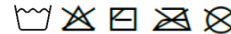

Funda almohada embarazo y funda almohada nasal:

Lavar a mano en frío o a máquina, temperatura máxima 30°C, con jabón neutro. Centrifugado 800-1000 rpm. Permite el uso de secadora, temperatura máxima de emisión 60°C. Planchado, temperatura máxima de 150°C. No usar lejía. No limpiar en seco.



Protector oreja:

Lavado a mano con agua fría y jabón neutro. Se puede limpiar con un paño o esponja húmeda. No usar lejía ni productos abrasivos. No limpiar en seco.



Durante su uso o en su limpieza: no utilice lejías, alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si el producto no está bien escurrido, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO O MANIPULACIÓN:** Manipule el producto según aparece en estas instrucciones. Almacenamiento: Para evitar su deformación se recomienda colocarlo en posición horizontal y sin apilar nada encima. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.

Fecha de creación: 07/2022

Fecha de revisión: 04/2024 | Rev. 2.1